


リナック社製モーター


不具合箇所の特定

最初に電源コード・接続コード・フットスイッチのコードが正しく装着されているかを確認してください。

1 制御（モーターが1台のベッド）

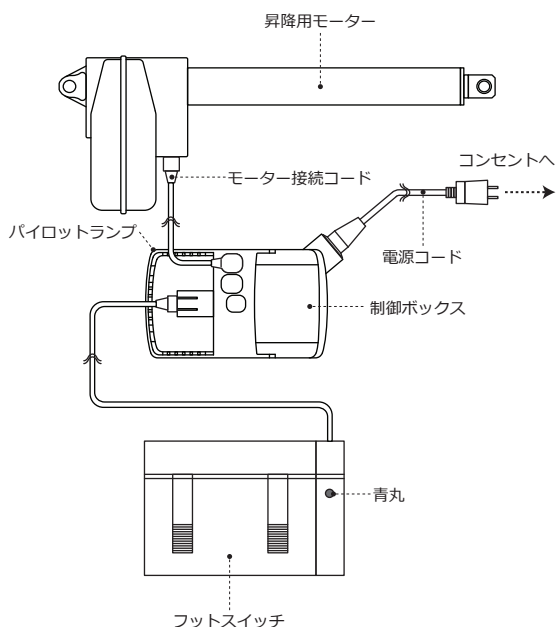

2 制御（モーターが2台のベッド）

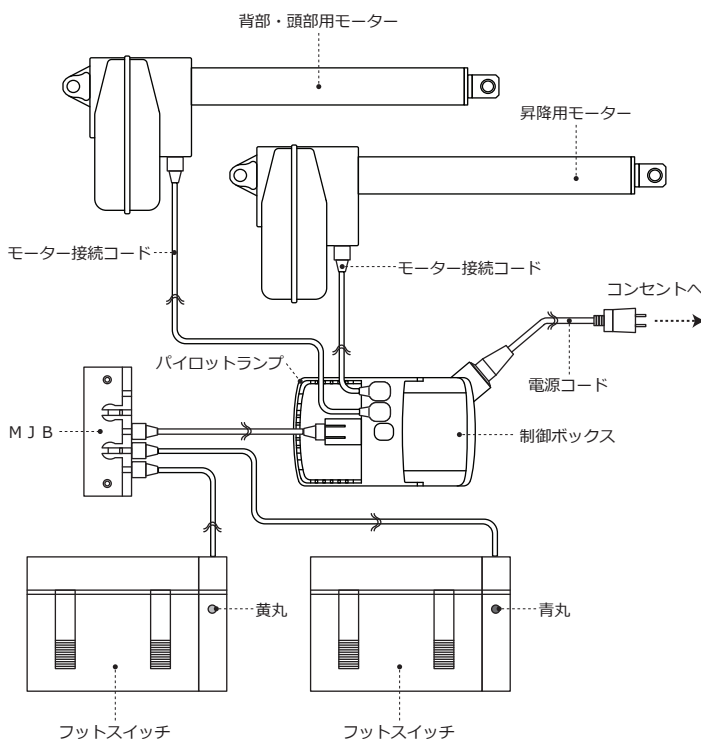


電源プラグをコンセントに差し込み、パイロットランプが点灯しているかを確認してください。

	症状	処置方法
点灯していない	電源コードがコンセントに差し込まれていない。	コンセントに差し込んでください。
	電源コード内部の断線の可能性があります。	電源コードを交換してください。 → ①参照
	制御ボックス内のヒューズ切れの可能性があります。	制御ボックスを交換してください。 → ②・④参照
点灯している	フットスイッチを踏むと、制御ボックスからカチカチと動作音がする。	制御ボックスを交換してください。 → ②・④参照
	フットスイッチを踏んでも、動作音がしない。	フットスイッチを交換してください。 → ②・③参照
	フットスイッチ、制御ボックスの両方を交換しても動作しない。	モーターを交換してください。 → ②・⑤参照


①電源コードの交換方法

最初に電源プラグをコンセントから抜いてから、電源コードの交換をしてください。

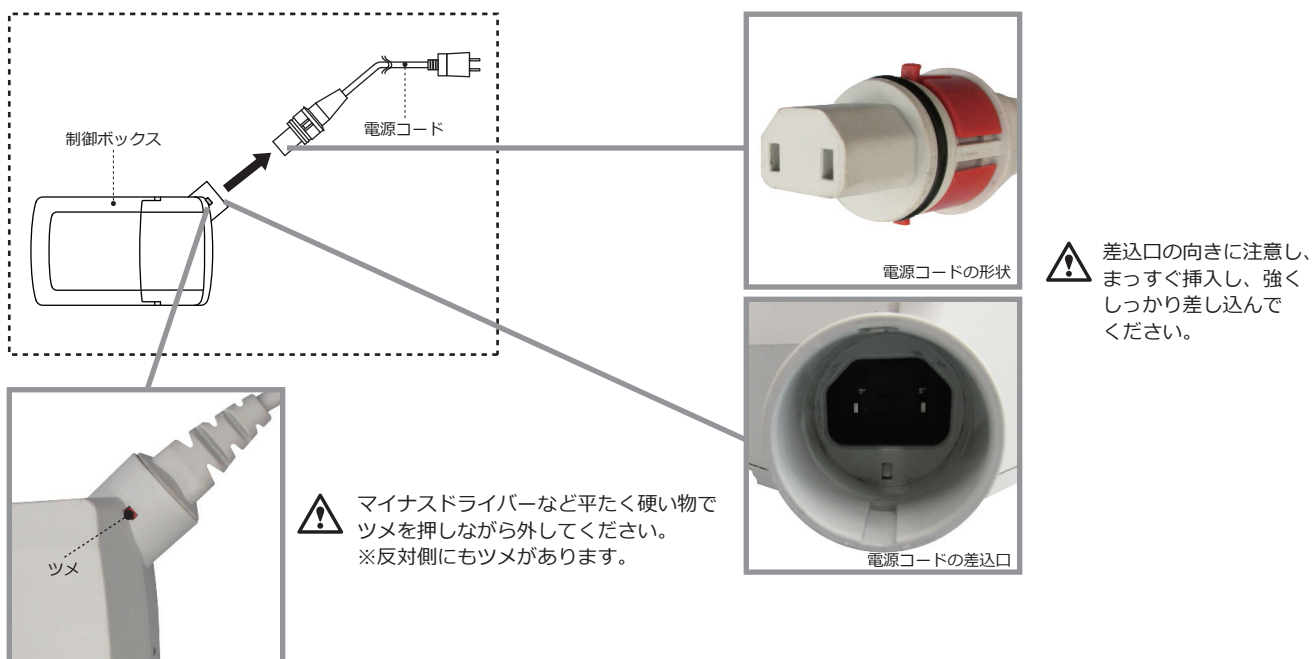


②制御ボックスの取り外し方法とカバーの開け方

■制御ボックスの取り外し方

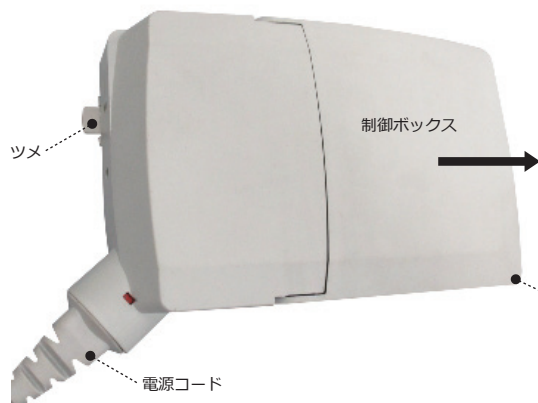

電源コード側にあるツメを押さえながら、横にスライドさせて制御ボックスを外してください。


■制御ボックスカバーの開け方

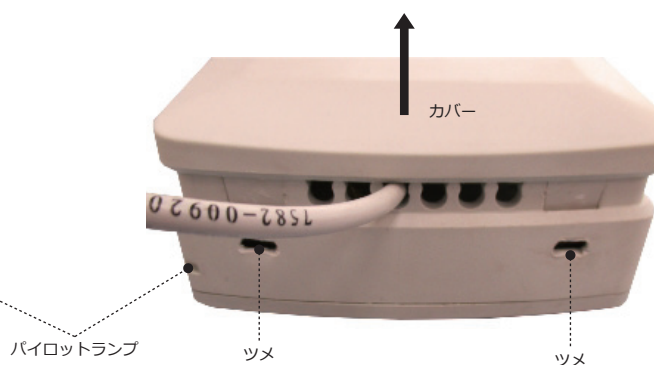


マイナスドライバーなど平たく硬い物で、両側のツメを押しながらカバーを持ち上げてください。

③ フットスイッチの交換方法


最初に電源プラグをコンセントから抜いてから、制御ボックスカバーを開き、フットスイッチの交換をしてください。

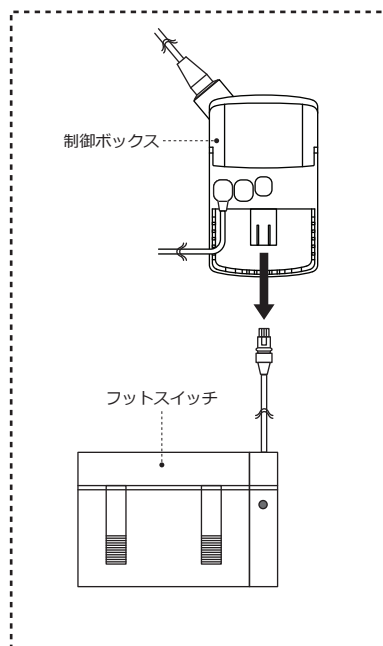

⚠ 差込口の向きに注意し、まっすぐ挿入し、強くしっかり差し込んでください。

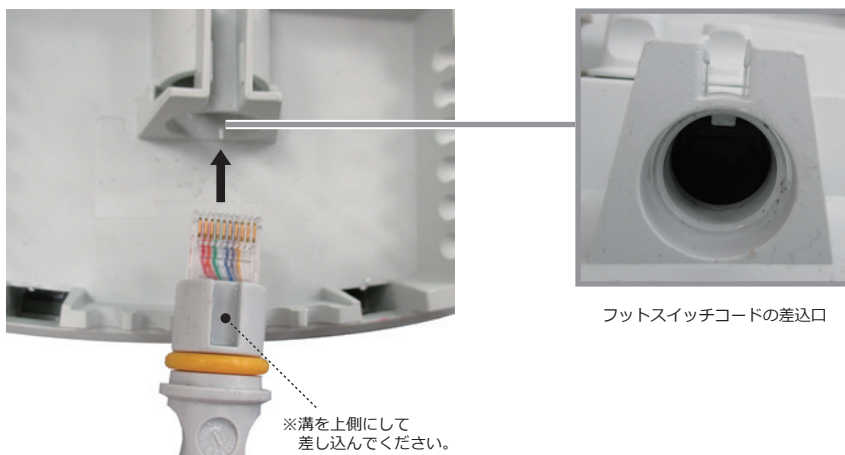


※差し込みが弱い場合、ベッドが上昇するが下降しない、下降するが上昇しない、または全く動かない等の不具合が生じる事があります。

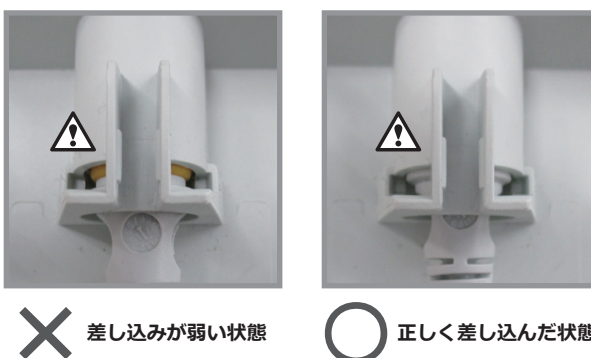

④ 制御ボックスの交換方法

電源コード・フットスイッチコード・モーター接続コードを取り外し、制御ボックスの交換をしてください。

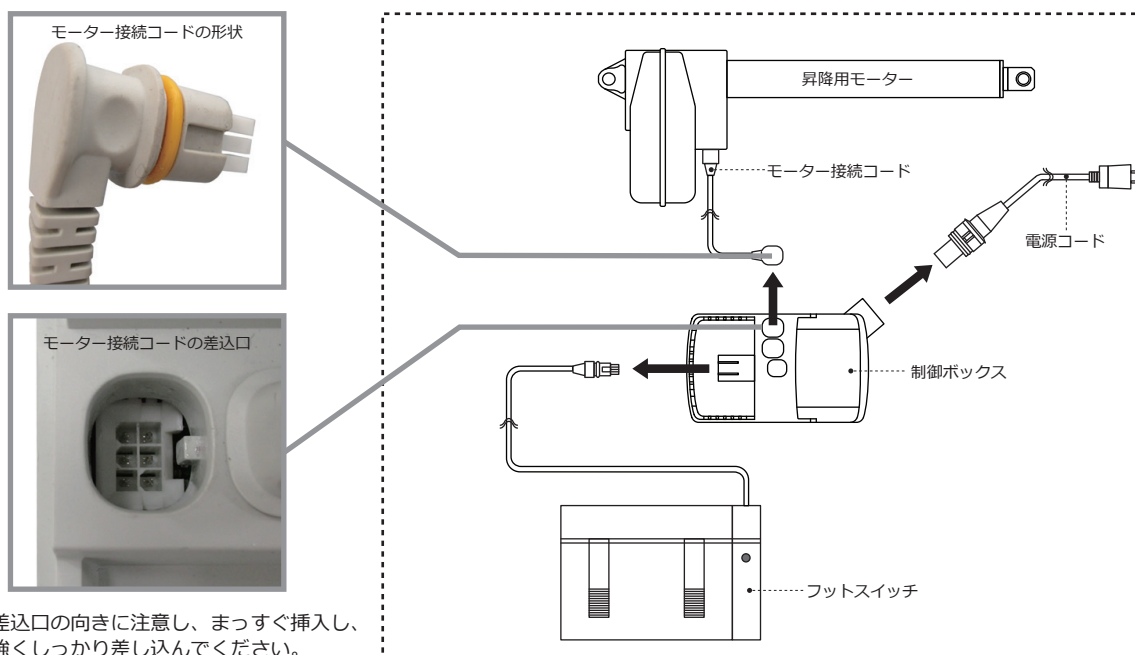


⚠ 差込口の向きに注意し、まっすぐ挿入し、強くしっかり差し込んでください。

⑤モーターの交換方法

⚠ 必ずベッドを横に倒してからモーターを交換してください。ベッドを倒さずにモーターを外すと、天板が落下し、けがをする危険があります。

最初に電源プラグをコンセントから抜いてから、制御ボックスカバーを開き、モーター接続コードを取り外してください。
次にベッドの脚部を揺すって、モーターが突っ張っていない状態にします。その後ストッパーピン、ピンを外してモーターの交換をしてください。

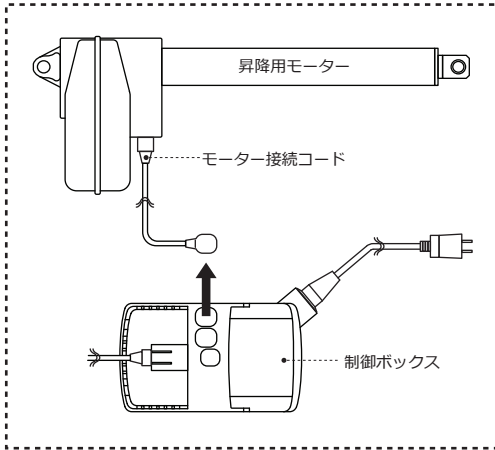

※モーターの取り付け向きを間違わないように注意してください。
破損の原因となります。
※取り付け向きは右写真参照

モーター交換後、ピン、ストッパーピンを取り付けてください。
その後モーター接続コードを取り付けてください。

